

# Poolingliste

1. Stellen Sie sicher, dass von jeder zu testenden Person neben dem Testmaterial ein Blatt mit **Einzelbarcodes**, sowie insgesamt ein Blatt mit **Poolbarcodes** für die gesamte Gruppe vorliegen.
2. Teilen Sie die Testmaterialien für jede zu testende Person aus.
3. Jeder Barcode ist in zweifacher Ausführung vorhanden. Kleben Sie zunächst einen der beiden **Poolbarcodes** auf das **Poolröhrchen**.
4. Kleben Sie den verbliebenen Poolbarcode mit dem **gleichen** Barcode in das entsprechend gekennzeichnete Feld oben auf diesem Zettel.
5. Entnehmen Sie für jede zu testende Person von dem jeweiligen Etikettenbogen mit den individuellen **Einzelbarcodes** ein Barcodeetikett und kleben dieses auf das Einzelröhrchen.
6. Kleben Sie das verbliebene Einzel-Etikett mit dem **gleichen** Barcode in ein freies Einzelbarcode-Feld unten auf diesem Zettel.
7. Führen Sie nun den Abstrich durch. Dazu nimmt jede Testperson zwei Stäbchen gleichzeitig in den Mund und speichelt diese für **ca 1min** gründlich ein.
8. Brechen Sie anschließend beide Stäbchen an der dafür vorgesehenen Stelle ab und stecken eines der Stäbchen mit dem Tupper nach unten in das mit dem Barcode der jeweiligen Person gekennzeichnete Einzelröhrchen. Das verbliebene Stäbchen stecken Sie gemeinsam mit den anderen Stäbchen der Gruppe (Max. 10) in das Poolröhrchen. Verschließen Sie beide Röhrchen gründlich.
9. Verpacken Sie anschließend die bis zu 10 Einzelröhrchen gemeinsam mit dem Poolröhrchen und diesem Zettel in einen Poolbeutel. Falten Sie diesen Zettel dabei so, dass die Barcodes von außen sichtbar sind. Kleben Sie das dritte Etikett zu diesem Pool mit der groß abgedruckten Poolnummer außen auf die Tüte.
10. Verpacken Sie alle Poolbeutel Ihrer Einrichtung gemeinsam in einen Transportbeutel und **schreiben Sie den Namen Ihrer Einrichtung mit einem wasserfesten Filzstift gut leserlich auf den Beutel, oder verwenden Sie eines der Etiketten mit dem Namen Ihrer Einrichtung von der Liste mit den Poolbarcodes**, um den Transportbeutel zu Kennzeichnen.

▼ Einzelbarcodes ▼

		X	X